



식품의약품안전처

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 안전성 정보 알림[수액세트]

- 귀 단체(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 최근 우리 처에 보고된 수액세트에 관한 안전성 정보와 관련하여 **안전사용 강화**를 위해 **의료기관 및 의료진에게 아래 사항을 준수**할 것을 권고하오니, 귀 단체(기관)의 회원에게 널리 알려주시기 바랍니다.

< 의료인 권고사항 >

환자의 안전을 위해 다음의 사항을 주의하여 수액세트 보조유량조절기(IV Flow Regulators, Dosi-Flow 등)를 사용하시기 바랍니다.

- 수액세트의 보조유량조절기(IV Flow Regulators, Dosi-Flow 등)는 업체·제품별 유량(Flow Rate) 허용오차가 상이하므로 유량조절기(Roller Clamp)의 보조수단으로만 활용하십시오.
- 수액세트 이용 시, 처방된 투약 속도로 정확히 주입되고 있는지 주기적으로 확인하십시오.

끝.

식품의약품안전처장

수신자 한국의료기기안전정보원장, 의료기관평가인증원장, 사단법인 대한병원협회, 대한중소병원협회장, 대한의사협회, 대한개원의협회의회장, 사단법인 대한간호협회장, 의료기기안전정보 모니터링센터장(17개 기관)

주무관 손혜경 의료기술사무관 김국한 의료기기안전평전결2023.10.26.가과장 가정훈

협조자

시행 의료기기안전평가과-5399 (2023. 10. 26.) 접수

우 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 식품의약품안전처 행정동 5층 515호 의료기기안전평가과 / www.mfds.go.kr

전화번호 043-719-5007 팩스번호 043-719-5000 / mild1763@korea.kr / 비공개(5)