

☎ 04427 서울시 용산구 이촌로46길 37(이촌동) [http://www.kma.org] / 전화(02)6350-6536 / 전송(02)793-8702
의무법제국장 김상구(6573)/ 의무팀장 이재용(6540)/ 팀원 전지숙(6536)/ E-mail: kma-js123@naver.com

문서번호 대의협 제0626-09457호

시행일자 2023. 10. 27.

수 신 수신처 참조

참 조

제 목 의료기기 안전성 정보 알림[수액세트],(식품의약품안전처)

1. 귀 회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 식품의약품안전처 의료기기안전평가과-5399(2023. 10. 26.)

3. 식품의약품안전처에서는 수액세트에 관한 안전성 정보와 관련하여 안전 사용 강화를 위해 의료기관 및 의료진에게 아래 사항을 준수할 것을 우리협회로 알려 온바, 귀 회 소속 산하단체 및 회원들에게 안내하여 주시기 바랍니다.

<의료인 권고사항>

환자의 안전을 위해 다음의 사항을 주의하여 수액세트 보조유량조절기(IV Flow Regulators, Dosi-Flow 등)를 사용하시기 바랍니다.

1) 수액세트의 보조유량조절기(IV Flow Regulators, Dosi-Flow 등)는 업체·제품별 유량(Flow Rate) 허용오차가 상이하므로 유량조절(Roller Clamp)의 보조수단으로만 활용하십시오.

2) 수액세트 이용 시, 처방된 투약 속도로 정확히 주입되고 있는지 주기적으로 확인 하십시오.

※붙임 : 식품의약품안전처 관련 공문 1부. 끝.

대한의사협회장

“국민의 건강과 행복, 의협이 함께 합니다”



수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장(각과개원의협의회장), 대한병원의사협의회장, 대한전공의협의회장, 대한공중보건의를사협의회장, 한국여자의사회장, 대한병원장협의회장